



DU KANNST DAS MIT DEM SMARTPHONE¹



FreeStyle *LibreLink* 


Die FreeStyle LibreLink App

Möchten Sie Ihre Glukosewerte mit Ihrem Smartphone auslesen?

Laden Sie sich die kostenfreie FreeStyle LibreLink App im Google Play Store oder dem App Store herunter und lesen Sie beim nächsten Sensor Ihre Werte mit Ihrem Smartphone aus.¹⁻⁴



Trendpfeil
Zeigt an, wie sich der Glukosewert verändert

 **Aktueller Glukosewert**
Sprachausgabe, wenn aktiviert

Bis zu 8 Stunden
Glukoseverlauf

Einfach **Notizen** hinzufügen, um wichtige Ereignisse aufzuzeichnen



Die FreeStyle LibreLink App ist kompatibel mit NFC-fähigen Android-Smartphones mit Android OS 5.0 oder höher und mit iPhone 7 und neuer mit dem Betriebssystem iOS 11 und höher.

Scannen Sie den FreeStyle Libre Sensor mit Ihrem Smartphone

Der schmerzfreie 1-Sekunden Scan zeigt Ihnen:

- Ihre aktuellen Glukosewerte
- Ihren Glukoseverlauf der letzten 8 Stunden
- Den Glukosetrend mittels Trendpfeilen

Das Scannen funktioniert auch durch die Kleidung.⁵


! Wenn Sie das Lesegerät und die FreeStyle LibreLink App gleichzeitig verwenden wollen, gilt es folgendes zu beachten:

Starten Sie zuerst den Sensor mit dem Lesegerät und scannen Sie danach den neu gestarteten Sensor mit dem Smartphone.




FreeStyle
Libre

Jetzt downloaden:

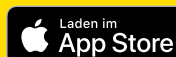

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.FreeStyle.Abbott



life. to the fullest.

Abbott

Managen Sie Ihren Diabetes jetzt noch einfacher mit dem kostenlosen und sicheren⁶ cloudbasierten Diabetes-managementsystem LibreView.⁷

Zwei einfache Schritte zu LibreView

1. Geben Sie **www.LibreView.com** in Ihren Webbrowser ein.
2. Klicken Sie auf „**Registrieren**“, wählen Sie die obere Box „**LibreView-Konto**“ aus und folgen Sie den Anweisungen.

Die FreeStyle LibreLink App überträgt die Daten automatisch in LibreView, wenn Sie das selbe Konto verwenden.

Tipp: Nutzen Sie bereits die FreeStyle LibreLink App? Dann melden Sie sich mit Ihren FreeStyle LibreLink Zugangsdaten an und analysieren Sie die Daten aus der App in Ihrem LibreView-Konto.



So teilen Sie Ihre Berichte mit Ihrem Diabetesteam

- Wählen Sie unter „**Kontoeinstellungen**“ den Menüpunkt „**Meine Praxen**“* aus und verbinden Sie sich mit der Praxis ID Ihres behandelnden Arztes.
- Die Verknüpfung kann jederzeit wieder entfernt werden.



Messen Sie Ihren Glukosewert mit der FreeStyle LibreLink App anstatt oder in Kombination mit dem FreeStyle Libre Lesegerät – Sie haben die Wahl!



Erkennen Sie Glukosemuster und Trends, wenn Sie unterwegs sind und teilen Sie Ihre Berichte mit Ihrem Arzt:

www.LibreView.com



Teilen Sie Ihre Glukosewerte mit Ihren Freunden, Ihrer Familie oder anderen Betreuungspersonen mit FreeStyle LibreLinkUp:

www.LibreLinkUp.com

LibreView

Kundenservice-Rufnummer für alle Fragen zu FreeStyle LibreLink und LibreView:

 0800-222 775**


Abbott

*Bei der Praxis-ID handelt es sich um einen eindeutigen 8- bis 16-stelligen Code. Dieser Code wird erzeugt, sobald Ihr Arzt bzw. jemand aus dessen Praxisteam die Praxisfunktion des LibreView-Fachkreise-Kontos aktiviert. Wenn Ihrem Arzt seine LibreView Praxis-ID nicht bekannt ist, kann er diese nach Anmeldung im LibreView-Fachkreise-Konto im Bereich mit den Praxis-Informationen abfragen. ** Montag bis Freitag (werktags) erreichbar von 8:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos aus dem österreichischen Netz.

1. Die FreeStyle LibreLink und LibreLinkUp Apps wurden für NFC-fähige Smartphones mit Android-Betriebssystem entwickelt, die die OS-Version 5.0 (Lollipop) oder höher verwenden, sowie iPhones mit OS-Version 11 oder höher (iPhone 7.0 oder höher). 2. FreeStyle LibreLink ist zertifiziert für Kinder ab 4 Jahren sowie Erwachsene, einschließlich Schwangere. (Weitere Informationen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch.) Die Aufsichtspflicht über die Anwendung und die Auswertung von FreeStyle Libre bei Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres obliegt der Verantwortung einer volljährigen Person. 3. Die Nutzung von FreeStyle LibreLink und LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu Inc. FreeStyle Libre Lesegeräte und Sensoren sind bei Abbott erhältlich. 4. Die FreeStyle LibreLink App und das FreeStyle Libre Lesegerät haben ähnliche aber keine identischen Funktionen. 5. Die FreeStyle LibreLink App kann die Daten des Sensors in einem Abstand von 1 bis 4 cm erfassen. 6. Die LibreView Daten werden in ein virtuelles nicht öffentliches Netzwerk übertragen und auf einer SQL-Server-Datenbank gehostet. Die Daten sind auf Dateiebene verschlüsselt. Die Verschlüsselung und Art der Schlüsselspeicherfunktionen verhindern, dass der Cloud-Hosting-Anbieter (Amazon Web Services) die Daten einsehen kann. Bei Nutzung von LibreView in Österreich werden die Daten auf Servern in der EU gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer Account ist passwortgeschützt. 7. LibreView wird von Newyu, Inc. entwickelt und vertrieben. FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott Diabetes Care Inc. in verschiedenen Ländern. Sonstige Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc., mit Sitz in den USA und weiteren Ländern. App Store ist ein Warenzeichen von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.